
	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CURĂȚAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE REUTILIZABILE	Ediția: I Nr.de ex.: II	Revizia: 0
	Cod:P.O.05.04-16/18	Exemplar nr.: 1	

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CURĂȚAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE REUTILIZABILE

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:

Nr. crt.	Elemente privind responsabil/ operațiune	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	
1.1.	Elaborat	Vera Oboroc	Șef secție sterilizare centralizată	10.07.2018	semnat
1.2.	Verificat	Aliona Grecu	Vicedirector Nursing	10.07.2018	semnat
1.3.	Aprobat	Larisa Catrinici	Director IMSP IO	10.07.2018	semnat

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CURĂȚAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE REUTILIZABILE	Ediția: I Nr.de ex.: II	Revizia: 0
	Cod:P.O.05.04-16/18	Exemplar nr.: 1	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale.

Nr. crt.	Ediția/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1			
2.2.	Revizia 1			

3. Lista persoanelor la care se difuzează procedura

Nr. d/o	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
1	Evidența, arhivare	1	SMECISAM	Manager al sistemelor de management al calității	Ludmila Cîrciumari	10.07.18	semnat
2	Arhivare (anexa la ordin IMSP IO nr.87 din 10.07.2018)	2	Cancelaria	Șeful cancelariei	Galina Dragan	10.07.18	semnat
3	Aplicare	1 în copie	Bloc operator, săli de proceduri și pansamente, săli de examinare a pacienților	Personalul medical	Plasat pe pagina web instituțională, rubrica Managementul calității		

4. Scopul procedurii:

Descrierea modului de aplicare corectă a metodelor de curățare și spălare a instrumentelor și dispozitivelor medicale.

Asigurarea documentației necesare desfășurării procesului menționat.

Asigurarea continuității activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

Suport pentru audit și/sau alte structuri abilitate în activități de evaluare, iar directorului la luarea deciziilor.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

PO se implementează și se aplică de către personalul secției cu responsabilități în activitățile procedurale respective.

6. Documente de referință: nominalizate în Procedura Operațională Internă 00 privind elaborarea PO, aprobată prin ordinul IMSP IO nr.166 din 02.11.2017;

6.1. Reglementări internaționale:


6.2. Reglementări naționale:

Ghidul de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale, ediția II, 2009 (capitolul 3-Asigurarea regimului sanitaro-antiepideemic) aprobat prin ordinul MS RM nr.51 din 16.02.2009;

6.3. Reglementări secundare:

6.4. Reglementări interne:

Regulamentul secției sterilizare centralizată, aprobat la 09.01.2018

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CURĂȚAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE REUTILIZABILE	Ediția: I Nr.de ex.: II	Revizia: 0
	Cod:P.O.05.04-16/18	Exemplar nr.: 1	

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură.

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
7.1.1.	Procedura operațională	Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor subdiviziunilor din IMSP IO.
7.1.2.	Curățarea	Etapa preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operațiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenți fizici și /sau chimici, care se efectuează în unitățile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate
7.1.3.	Produse biocide	Substanțele active și preparatele conținând una sau mai multe substanțe active condiționată într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice să facă inofensivă și să prevină acțiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice
7.1.4.	Produs detergent dezinfectant	Produsul care include în compoziția sa substanțe care curăță și substanțe care dezinfectează; produsul are dubla acțiune- curăță și dezinfectează
7.1.5.	Imersie	Scufundare a unui corp într-un lichid. Metoda se folosește în scopul diminuării riscului de stropire și inhalare de aerosoli de către personalul care efectuează spălarea manuală.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

PO – Procedura operațională

MSMPS- Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale

IMSP – Instituția Medico-Sanitară Publică

IO – Institutul Oncologic

CC – Consiliul Calității

SMC – Sistem de management al calității

SMECISAM – Secția monitorizare evaluarea calitate și integrare a serviciilor de asistență medicală

8. DESCRIEREA PROCEDURII:

8.1. Generalități

Curățarea dispozitivelor medicale reutilizabile este prima etapă foarte importantă în reducerea riscului transmiterii infecțiilor nosocomiale.

8.2. Documente utilizate:

- Procedura operațională internă privind elaborarea procedurilor operaționale standard POI-00

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale:

- cutii cu pereți rigizi completate cu cutii mai mici cu găuri pentru scurgerea sol.detergent;
- soluții detergent pentru instrumentar;
- perii de forme diferite pentru spălarea instrumentarului;
- echipamente pentru protecția personalului;

8.3.2. Resurse umane: personalul medical mediu implicat în proces

8.3.3. Resurse financiare: în cadrul devizului de venituri și cheltuieli

8.3.4. Resurse nemateriale: pregătirea personalului implicat în proces


8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea acțiunilor activității

Pregătirea sol.detergent

Curățarea instrumentarului chirurgical

Transportarea articolelor medicale în secția sterilizare

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CURĂȚAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE REUTILIZABILE	Ediția: I Nr.de ex.: II	Revizia: 0
	Cod:P.O.05.04-16/18	Exemplar nr.: 1	

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- Asistentul medical va îmbracă echipamentul de protecție compus din: bonetă, mască, șorț, mănuși;
- Imediat după utilizare, instrumentul/dispozitivul medical va fi imersat în soluție detergent, care este compusă din: 5 g praf, 200ml sol, apă oxigenată 3%, 795 ml apă (t⁰ să nu depășească 50⁰C) în vasul special pentru spălarea instrumentarului **nu mai mult de 12 ore!** SOLUTIA ESTE COROZIVĂ. ATENTIE SPORITA!
- Ulterior, piesele vor fi dezasamblate și cu ajutorul unor perii de forme diferite în funcție de necesitate, instrumentul se va curăța în totalitate prin periaj atent, canalele se vor iriga cu soluția detergent;
- Se extrage cutia cu găuri, din cea de bază, pentru clătirea instrumentarului;
- Clătirea se va face sub getul de apă de la robinet;
- Se așează instrumentarul în container și se transportă în secția de sterilizare;

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

Aprecierea vizuala a instrumentarului medical curățat.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

9.1. Responsabilii de proces:

Personalul medical mediu implicat în proces.

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Cuprins:

Nr.	Denumirea componentei	Pagina
1.	Denumirea PO. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3.	Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4.	Scopul procedurii	2
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	2
6.	Documentele de referință aplicabile activității procedurale	2
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	3
8.	Descrierea Procedurii	3
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	4
10.	Anexe	4
11.	Cuprins	4